

femSense®

Monitor płodności | Pierwsze kroki

Uwaga! Nie przyklejaj plastra zanim nie poprosi o to aplikacja femSense!

Rejestracja / Login:

1. Ściągnij aplikację
2. Utwórz konto
3. Kliknij na "Dzisiaj" (Today) aby zobaczyć kiedy przykleić plaster



Przyklejenie i aktywacja plastra:



1. Oczyszć i wysusz skórę, nie używaj dezodoratu/płynu przed przyklejeniem plastra



2. Umieść rękę na biodrze i przyklej plaster zgodnie z instrukcją z aplikacji femSense



3. Aby aktywować plaster, wybierz "sczytaj plaster" (Read Patch) i postępuj zgodnie z instrukcją z aplikacji

Instrukcja użycia



www.femsense.com/ifu

Rev.:
220007A

